

碧南工科高校に2台目のAEDが設置されました (R4.11.29~)



使い方は1台目と同じです。

- ①電源を入れる ②パッドをはる ③ショックボタンを押す
緊急時は「迷わず 速やかに」使ってください。

サマリタン PAD 350P・450P 簡易操作説明 ※詳しくは付属のユーザーマニュアルを確認して下さい。

- ① 緑の電源ボタンを押す。
- ② 緑のタブを引き、パッドを取り出す。
- ③ 電極パッドを絵の通り素肌に貼る。
- ④ 心電図の解析が始まる。傷病者に触れない。
- ⑤ ショックボタンが点滅したらボタンを押す。

カバーの上から操作可能です

右記 QR コードを読み取ると、動画でご確認いただけます。

サマリタンを用いた一時救命処置の手順